

ОБНОВЛЁННЫЕ ПРОГРАММЫ СИНТЕРИЗАЦИИ



Обновлённые программы синтеризации — чтобы вы работали уверенно и без лишних затрат времени на поиск актуальных параметров.

Цифровая команда Рокада Мед заранее позаботилась об этом вопросе.

Мы подготовили наглядную таблицу с актуальными синтеризационными программами и адаптировали их специально для печей Rivox.

Он поможет вам сразу выйти на стабильный и предсказуемый результат синтеризации — без риска испортить материал.

Уверенная работа с первого запуска — это ваши довольные пациенты и уверенный рост практики.

Общие рекомендации:

1. Настройки температуры необходимо корректировать на основе фактических показаний температуры каждой отдельной печи.
2. Рекомендуемая температура открывания печи: ниже 100 °С.
3. Скорость нагрева должна регулироваться в соответствии с максимальным пределом для каждой печи спекания. Некоторые печи не могут достигать высоких скоростей нагрева, указанных ниже.



Диски, фрезы, всё для цифры — на RocadaBox



3D FAST for Rivox M2

Единичная коронка, короткий мост	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	10	8	4	5	8	0
Темп(°C)	300	900	1250	1530	800	0
Время выдержки(мин.)	0	10	30	120	0	0
Длинный мост	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	10	6	3	4	6	0
Темп(°C)	300	900	1250	1530	800	0
Время выдержки(мин.)	0	10	30	120	0	0

3D FAST for Rivox M1 Pro

Единичная коронка (Старт синтеризации с комнатной температуры)	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	60	35	20	10	0	0
Темп(°C)	1000	1200	1350	1560	0	0
Время выдержки(мин.)	0	0	0	20	0	0
Короткий мост (Старт синтеризации с комнатной температуры)	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	60	35	10	6	0	0
Темп(°C)	1000	1200	1350	1555	0	0
Время выдержки(мин.)	0	0	0	25	0	0



Серия 3D ML, SHT ML, SHT Preshaded

Единичная коронка,короткий мост	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	10	8	4	5	8	0
Темп(°C)	300	900	1250	1530	800	0
Время выдержки(мин.)	0	10	30	120	0	0
Длинный мост	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	10	6	3	4	6	0
Темп(°C)	300	900	1250	1530	800	0
Время выдержки(мин.)	0	10	30	120	0	0



Smile 15°

Единичная коронка, короткий мост	I	II	III	IV	V	VI
Нагрев(°C/мин.)	10	8	4	5	8	0
Темп(°C)	300	900	1250	1500	800	0
Время выдержки(мин.)	0	10	30	120	0	0



Если при переносе настроек возникнут любые вопросы — мы рядом и поможем разобраться. Обращайтесь к представителям Рокада Мед в своем регионе: нам важно, чтобы техника работала на ваш бизнес, а не отнимала время.